



Roczeki

Obuwie profilaktyczne

Wyrób medyczny

### Instrukcja używania

Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek w niej zawartych. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez producenta zastosowaniem. W razie wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu lub w przypadku stwierdzenia wad wrodzonych lub nabytych kończyn dolnych u dziecka, należy zasięgnąć porady ortopedy lub pediatry.

## Najważniejsze buty na świecie!

*Pierwsze buty są tak ważne, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zdrowie dziecka.*

Emele to jedyne buty dla dzieci **wykonane ręcznie** tak doskonale, że posiadają **Wieczystą Gwarancję**. Powstają w manufakturze, w której pasjonaci dbają o dziecięce stopy. **Dlaczego montaż ręczny jest tak ważny?** Ponieważ żadna maszyna nie jest w stanie wyczuć napiężeń delikatnych skór, stosowanych do produkcji Emeli. Dlatego właściwości ludzkich rąk są niezastąpione. Skóra to główny element konstrukcji, mający bezpośredni wpływ na wygodę, funkcjonalność i wygląd buta. Jej doborem zajmuje się osobiście właścicielka firmy, stawiając współpracującym garbarniom bardzo wysokie wymagania.

### Sposób użytkowania

Ręcznie wykonane **Roczeki EMEL Obuwie profilaktyczne** stanowią idealne rozwiązanie dla dzieci zaczynających trudny proces nauki chodzenia. Aby buciki mogły spełnić swoje zadanie, należy właściwie dopasować rozmiar bucika do długości oraz tęgości stopy dziecka. Buty należy użytkować zgodnie z podanymi niżej zaleceniami. Obuwie może być używane wyłącznie przez jedno dziecko. Czas ciągłego noszenia butów przez dziecko nie może przekraczać 12 godzin. Podczas używania obuwia przez małe dzieci, buciki powinny być zakładane lub zdejmowane przez osoby dorosłe. W czasie użytkowania obuwia należy przestrzegać odpowiedniej pielęgnacji zgodnie z zasadami podanymi w dalszej części instrukcji.

### Pamiętaj:

**Stopa nie może do buta dorastać. To but ma być właściwie dopasowany do stopy!**

### Przewidziane zastosowanie wyrobu

Roczeki Emel obuwie profilaktyczne, w normalnych warunkach stosowania, zalecane są do użytkowania u dzieci w profilaktyce, jak i we wspomagającym leczeniu i rehabilitacji zniekształceń wzrostowych oraz nabytych kończyn dolnych, takich jak:

- Koślawość kolan,
- Koślawość stóp,
- Szpotawość stóp,
- Stopy płasko-koślawe,
- Stopa wiotka,
- Płaskostopie podłużne,
- Płaskostopie poprzeczne,
- Paluch koślawy,
- Szponiaste ustawienie palców.

Po zastosowaniu odpowiednich wkładek ortopedycznych, dobranych przez lekarza specjalistę, mogą być stosowane w leczeniu zachowawczym wyżej wymienionych schorzeń.

### Sposób czyszczenia i konserwacji:

Zasady stosowania i prawidłowej pielęgnacji obuwia: Aby nie doprowadzić do zniekształcenia wyrobu, należy zawsze zakładać lub zdejmować obuwie rozsznurowane lub rozpięte. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dziecka, sprawdź czy obuwie po założeniu zostało dobrze zasznurowane lub zapięte. W miarę możliwości należy zmieniać obuwie jak najczęściej. Nie należy używać przez długi czas wyłącznie jednej pary. Obuwie powinno być użytkowane stosownie do pory roku. Powinno się je czyścić i konserwować codziennie, za pomocą odpowiednich środków impreguracyjnych.

### Pamiętaj! Obuwie skórzane nie jest odporne na wilgoć

Tylko dzięki regularnej pielęgnacji, skóra cholewki obuwia zachowa długotrwałą ochronę, co pozwoli zwiększyć jej odporność na wilgoć. Nie można dopuścić do silnego zabrudzenia i przemoczenia. Zabrudzone obuwie należy czyścić używając wilgotnej tkaniny lub włosianej szczotki.

### Nie można prać obuwia!

Przemoczony but traci swoje właściwości i odkształca się, co powoduje jego deformację, odbarwienie skóry wierzchniej, utratę jej elastyczności, a nawet pęknięcie. W rezultacie spoiny klejowe i szwy osłabiają się. Jeżeli jednak dojdzie do zamoczenia obuwia, należy suszyć go w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła (np. piec, grzejniki). Wysuszone obuwie należy zaimpregnować właściwym preparatem, stosownie do rodzaju użytej skóry naturalnej.

### Ważne informacje dotyczące właściwego użytkowania wyrobu

#### Szczególne zasady eksploatacyjne

Wyrób należy stosować zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem. Obuwie wykonane jest ze skóry, która jest surowcem naturalnym. Z tego względu, możliwe jest obniżenie trwałości koloru, co nie wpływa niekorzystnie na cechy funkcjonalne wyrobu. Należy chronić wyrób przed wilgocią i nie dopuścić do przemoczenia. Ze względu na dopuszczalne dla tego typu wyrobów: ślady przebarwień, drobne różnice autentyczności i słabotności skóry oraz oznaki indywidualności wyrobu, należy obuwie impregnować. Służą do tego odpowiednie środki konserwująco-impregnujące, które należy używać zgodnie z przeznaczeniem obuwia i zastosowaną w nich kolorystyką. Niedopuszczalne jest pranie lub pozostawienie w wodzie obuwia - pozbawia to skórę elastyczności, powodując jej wysuszenie, pęknięcie oraz osłabienie szwów i spoin klejowych.

### Zasady sposobu konserwacji obuwia ze skóry naturalnej:

Poniżej przedstawiamy sposoby konserwacji obuwia, w zależności od rodzaju skóry, z której wyrób jest wykonany:

#### Dla obuwia wykonanego ze skór Nubuk, Welur:

- Czyścić delikatnie przy pomocy włosianej i/lub gumowej szczoteczki.
- Impregnować środkami w aerozolu, przeznaczonymi do skór nubukowych i welurowych.
- Nie polerować oraz nie używać past i kremów.

#### Dla obuwia wykonanego ze Skór licowanych:

- Czyścić wilgotną tkaniną lub gąbką.
- Impregnować pastą bezbarwną lub pod kolor skóry.
- Polerować miękką szczotką włosianą.

#### Dla obuwia wykonanego ze Skór typu nubuk woskowany (typu przecierki):

- Czyścić przy pomocy włosianej i/lub gumowej szczoteczki.
- Impregnować środkami w aerozolu, przeznaczonymi do skór nubukowych i welurowych.
- Nie polerować oraz nie używać past i kremów.

#### Dla obuwia wykonanego ze Skór lakierowanych i naplakowych:

- Zabrudzenia usuwać tkaniną lub gąbką.
- Impregnować jedynie przy użyciu preparatów przeznaczonych do skór lakierowanych.
- Nie pastować.

#### Dla obuwia wykonanego z dwoiny (ze skóry krytej)

- Czyścić przy pomocy delikatnej włosianej szczoteczki.
- Nie stosować impregnatów w sprayu, past i kremów.

### Uwaga!

Wierzchy naszego obuwia wykonane są ze skór naturalnych. W przypadku skór naturalnych obuwie może nie zachowywać identycznego koloru oraz struktury na całej powierzchni. Różnice te wynikają z niejednorodności skóry i są jej zaletą.

### Przeciwwskazania do stosowania

W przypadku podrażnień, uszkodzeń, odparzeń, otwartych i niezabezpieczonych opatrunkiem ran lub owrzodzeń, lub innych chorób dermatologicznych skóry stóp występujących na skórze stopy dziecka, nie można zakładać obuwia. Obuwia nie mogą użytkować dzieci uczulone na skórę zwierzęcą. W sytuacji, gdy u dziecka występuje tendencja do nadmiernej potliwości, należy często zdejmować obuwie i przewietrzyć stopę. W takich przypadkach zalecane jest ograniczenie czasu użytkowania do kilku godzin. W przypadku dzieci, u których występuje skłonność do występowania schorzeń skóry stóp, należy skonsultować się z lekarzem dermatologiem, pediatrą lub ortopedą.

### Ostrzeżenia:

Obuwie należy zakładać wyłącznie na stopy osłonięte bawełnianą skarpetką. Obuwie musi być prawidłowo dopasowane do rozmiaru i kształtu stopy dziecka. Nie można doprowadzić do wystąpienia miejsc uciskowych. W celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i czasu używania wyrobu, nie należy stosować obuwia silnie zniekształconego, przemoczonego lub uszkodzonego.

Możliwe jest zdeformowanie obuwia u dzieci ze zdiagnozowanymi wadami kończyn dolnych. W przypadku stwierdzenia wad wrodzonych lub nabytych kończyn dolnych u dziecka, należy zasięgnąć porady ortopedy lub pediatry.

### Działania niepożądane

W normalnych warunkach użytkowania obuwia i zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji, nie powinny wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.

### Sposób przechowywania:

Obuwie należy przechowywać w suchym, przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze od 10-30°C, w bezpiecznej odległości od źródła ciepła (np. piecyki ciepłe, kaloryfery, grzejniki) oraz promieniowania słonecznego.

### Wyjaśnienie symboli oznaczających skład surowcowy:

- ☼ Skóra naturalna
- ☼ Skóra pokryta
- ☼ Materiał włókienniczy
- ◇ Inny materiał
- ☼ Wierzch
- ☼ Podszewka z wyściółką
- ☼ Spód

### Wyjaśnienie symboli stosowanych w oznakowaniu wyrobu:

	Oznakowanie zgodności CE (potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745)		Producent		Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania		Numer katalogowy		Numer serii
	Trzymać z dala od światła słonecznego		Chronić przed wilgocią		Dopuszczalna temperatura

W razie wystąpienia każdego poważnego incydentu związanego z wyrobem, należy niezwłocznie poinformować producenta o tym zdarzeniu pisemnie na adres: Emel s.c. Beata Kudrzym, Cezary Kudrzym, Karol Kudrzym, Ludowa 28 A, 42-215 Częstochowa, Polska, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 34 3614914 lub elektronicznie na adres e-mail: emel@emel.com.pl oraz właściwy organ państwa członkowskiego, na którego terytorium miał miejsce incydent.

„Emel” S.C. Beata Kudrzym, Cezary Kudrzym, Karol Kudrzym  
ul. Ludowa 28 A, 42-215 Częstochowa, Polska  
tel.: +48 34 3614914, NIP: 949-14-20-695  
e-mail: emel@emel.com.pl, www.emel.com.pl

